

РЕКОМЕНДАЦИИ ПАЦИЕНТУ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОДЕЖДЫ ИЗ СЖИМАЮЩЕЙ ТКАНИ

- 1. ДАННУЮ ОДЕЖДУ СЛЕДУЕТ НОСИТЬ В ТЕЧЕНИЕ 23 ЧАСОВ В СУТКИ, И СНИМАТЬ ЕЕ ТОЛЬКО ВО ВРЕМЯ КУПАНИЯ.**
- 2. ЖЕЛАТЕЛЬНО ЕЖЕДНЕВНО СТИРАТЬ ШАМПУНЕМ ДЛЯ ДЕЛИКАТНОЙ СТИРКИ В ПРОХЛАДНОЙ ВОДЕ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ СТИРКА, А ТАКЖЕ СУШКА В МАШИНЕ ИЛИ ПОД ПРЯМЫМИ СОЛНЕЧНЫМИ ЛУЧАМИ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННЫХ ТРЕБОВАНИЙ НАНОСИТ УЩЕРБ ИЗДЕЛИЮ.**
- 3. ТРЕБУЕТСЯ ОДЕВАТЬ ДАННУЮ ОДЕЖДУ ТОЛЬКО НА СУХУЮ КОЖУ. РАЗЛИЧНЫЕ МАСЛА И МАЗИ НАНОСЯТ УЩЕРБ ТКАНИ.**
- 4. СРОК ЛЕЧЕНИЯ ОТ ГОДА ДО ДВУХ ЛЕТ, ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ.**
- 5. СВОЙСТВА ТКАНИ СОХРАНЯЮТСЯ ОТ ДВУХ ДО ЧЕТЫРЕХ МЕСЯЦЕВ, В СООТВЕТСТВИИ С КАЖДЫМ ОТДЕЛЬНЫМ СЛУЧАЕМ. ВРАЧ ОПРЕДЕЛЯЕТ СРОК, ПО ИСТЕЧЕНИИ КОТОРОГО НЕОБХОДИМО ЗАКАЗАТЬ НОВУЮ ОДЕЖДУ.**
- 6. ВО ВРЕМЯ НОШЕНИЯ ОДЕЖДЫ РАЗРЕШЕНО ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, ВКЛЮЧАЯ СПОРТИВНУЮ. СРАЗУ ПОСЛЕ КУПАНИЯ В МОРЕ ИЛИ БАССЕЙНЕ ТРЕБУЕТСЯ ПРОПОЛОСКАТЬ ОДЕЖДУ В ПРОТОЧНОЙ ВОДЕ.**
- 7. С ЦЕЛЬЮ СОХРАНЕНИЯ ЭЛАСТИЧНОСТИ ТКАНИ СЛЕДУЕТ С ОСТОРОЖНОСТЬЮ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИЗДЕЛИЕМ. ПРИ ОДЕВАНИИ НЕОБХОДИМО АККУРАТНО НАТЯГИВАТЬ ТКАНЬ, НО НЕ ЭЛАСТИЧНУЮ ТЕСЬМУ, ПРИШИТУЮ К НЕЙ.**
- 8. В СЛУЧАЕ ПОЯВЛЕНИЯ ОСОБЫХ ИЗМЕНЕНИЙ (ОСТРАЯ БОЛЬ, ОПУХАНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА ИЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ ТРАВМИРОВАННОГО МЕСТА) СЛЕДУЕТ НЕМЕДЛЕННО СНЯТЬ ОДЕЖДУ И ОБРАТИТЬСЯ В ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕЧЕБНОЙ ТЕРАПИИ, В КОТОРОМ ВЫ НАБЛЮДАЕТЕСЬ.**

**С ПОЖЕЛАНИЕМ СКОРЕЙШЕГО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ
КОЛЛЕКТИВ «URIEL- COMAR»**