



COMAR

Pressure Garments
& Silicones.

URISIL-LINE®

قطع قماش مع طلاء سيليكون

URISIL-LINE هي قطعة قماش مع طلاء سيليكون من نوع medical-grade, المعدة لعلاج الندب المتضخمة أو كعلاج وقائي لمنع تطورها. تضاف هذه القطع داخل اللباس الضاغط أو تحته, أو كأصبع منفصل.

نصائح لعناية هذا المنتج:

يجب غسل **URISIL-LINE** (أو اللباس المضاف إليه) يوميا بماء فاتر وصابون غسيل غير دهني. يجب تنشيف القطعة قبل إعادة وضعها على الندب النظيفة والناشفة.

- يجب عدم استعمال مواد تنظيف أخرى التي بإمكانها التسبب بتهييج الجلد.
- يجب عدم استعمال المحارم الورقية للتنشيف لمنع التصاق السيليكون بها.
- للانتباه: يجب غسل قطعة القماش في فترات متقاربة في الأيام الحارة أو بعد بذل مجهود بسبب تعرق الجلد لضمان تماسك أفضل لقطعة القماش على الجلد.
- يجب عدم استعمال مراهم على الجلد عند استعمال قطع **URISIL-LINE**.

خلال فترة العلاج, يجب استعمال **URISIL-LINE** 12 ساعة على الأقل. يجب استعمال قطع **URISIL-LINE** لفترة 23 ساعة متواصلة وإزالته فقط للتنظيف.
لتعويد الجلد على قطع **URISIL-LINE** يجب استعمالها في اليوم الأول والثاني لساعتين فقط, في اليومين التاليين ل-4 ساعات فقط وتمديد فترة الاستعمال بساعتين كل يوم حتى الاستعمال ل-23 ساعة يوميا.

يجب عدم استعمال **URISIL-LINE** على جروح مفتوحة,
جروح مع افرازات أو مع مرضى يعانون من أمراض جلدية

في حال علاج ندب جراحية استعمال قطع **URISIL-LINE** يكون فقط بعد إزالة الغرز.

في حال تطور حساسية على الجلد ألمعالج بقطعة **URISIL-LINE** يجب فحص:
نظافة الجلد.

وجود ضغط زائد على الجلد.

في حال وجود حساسية على الجلد يجب التوقف عن استعمال السيليكون والتوجه للمعالجة الوظيفية.

URIEL P.G.



23, Hamessila Str. 36885 Nesher, Israel Tel: 972-4-9049713 Fax: 972-3-5214614

Expooter No. 514156553

www.comar.co.il

E-mail: info@comar.co.il